



Ny teknologi sender alarm til dig inden folingen

Når et føl er i vente, så ved du måske, hvor nervepirrende ventetiden kan være. Det er vigtigt at være til stede ved folingen, så du kan sikre dig at alt er i orden og har mulighed for at hjælpe ved komplikationer. Podas folealarm sender dig en besked lige inden folingen, så du kan nå frem i tide.

Reagerer på hestens adfærd - ikke sved

Podas Folealarm virker ved, at sensoren i bæltet omkring hoppen reagerer på hestens adfærd lige inden folingen. Studier af hestens natur har vist, at adfærdsmønsteret er utrolig forudsigeligt.

Derfor er denne teknologi yderst pålidelig, i modsætning til tidligere tiders folealarmer, der forsøgte at reagere på svedafsondring.

FOLEALARM med radio

Radiotransmissionen har en rækkevidde på 1000 m. Det er langt de fleste steder rigeligt til at alarmeren når frem til stuehuset.

Denne model er fuldstændig uafhængig af mobildækning.

Leveres komplet med sender, modtager, holder og gjord.

FOLEALARM GSM

GSM modellen ringer til op til 2 mobiltelefonnumre, som du selv kan vælge.

FOLEALARM GSM virker uanset om du er hjemme, shopper eller arbejder. Dog kun hvis der er mobiltelefondekning ved hesten i stalden.

Sælges komplet med holder og gjord. Vi leverer gerne alarmeren med et SIM-kort.

Sådan virker Podas FOLEALARM:

NORMAL INDSTILLING

For hopper, der hviler normalt. Når presseveerne begynder, lægger hoppen sig fladt på siden for at presse optimalt. Folealarmen registrerer dette og alarmen aktiveres efter 7,6 sekunder. Én pressevé varer minimum 7 sekunder.



Hoppen skal fole




Hun lægger sig på siden



Folealarmen måler tiden.



Alarmen går efter 7,6 sek.

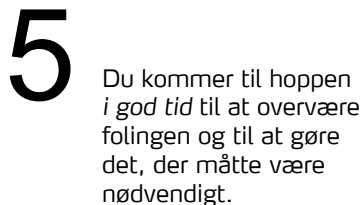

Du kommer til hoppen *i god tid* til at overvære folingen og til at gøre det, der måtte være nødvendigt.



Føllet plejes

SPECIEL INDSTILLING

Anvendes til hopper, der normalt hviler på siden. Her er to situationer mulige, når hun lægger sig på siden: enten hviler hoppen, eller også foler hun.

Sådan fungerer FOLEALARMEN her:



Hoppen skal fole




Hun lægger sig på siden



Folealarmen måler tiden. Går der over 3 minutter hviler hun sig, idet en pressevé højst varer 2,5 min. Går der mere end 7,6 sek. og mindre end 3 minutter til hun rejser sig igen, går alarmen.



Alarmen går!

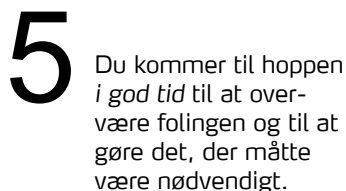

Du kommer til hoppen *i god tid* til at overvære folingen og til at gøre det, der måtte være nødvendigt.



Føllet plejes

FOLEALARMEN består af:

Holder og gjord, så den kan sættes på hoppen, samt senderen, der sender signalet (bill. 1).

Derudover en radio-modtager, hvis du vælger Folealarm med radio-transmission (Bill. 2). Vælger du GSM udgaven kræves, at du har en mobiltelefon.



FOLEALARMEN

sidder godt på hesten. Den solide gjord ses tydeligt. Den generer ikke hesten unødvendigt. Kort sagt:

Sikkert, trygt og komfortabelt!

